

Notice Simplifiée EMMA™

Le 1er capnomètre d'urgence

1. Emma fonctionne avec toutes les connexions patients





2. Emma assure une ventilation et une intubation correcte dans n'importe quel environnement




3. Emma offre une lecture simplifiée


Intubation correcte

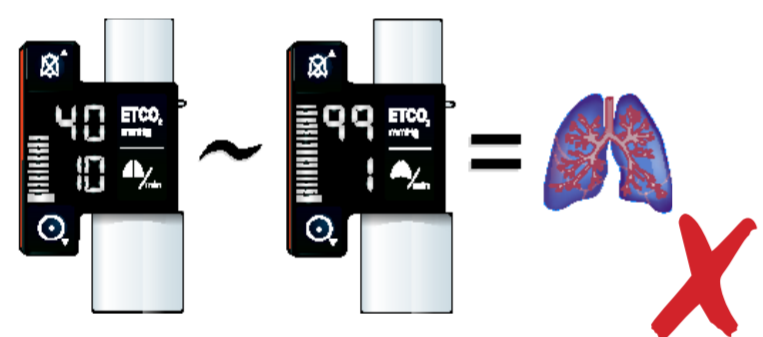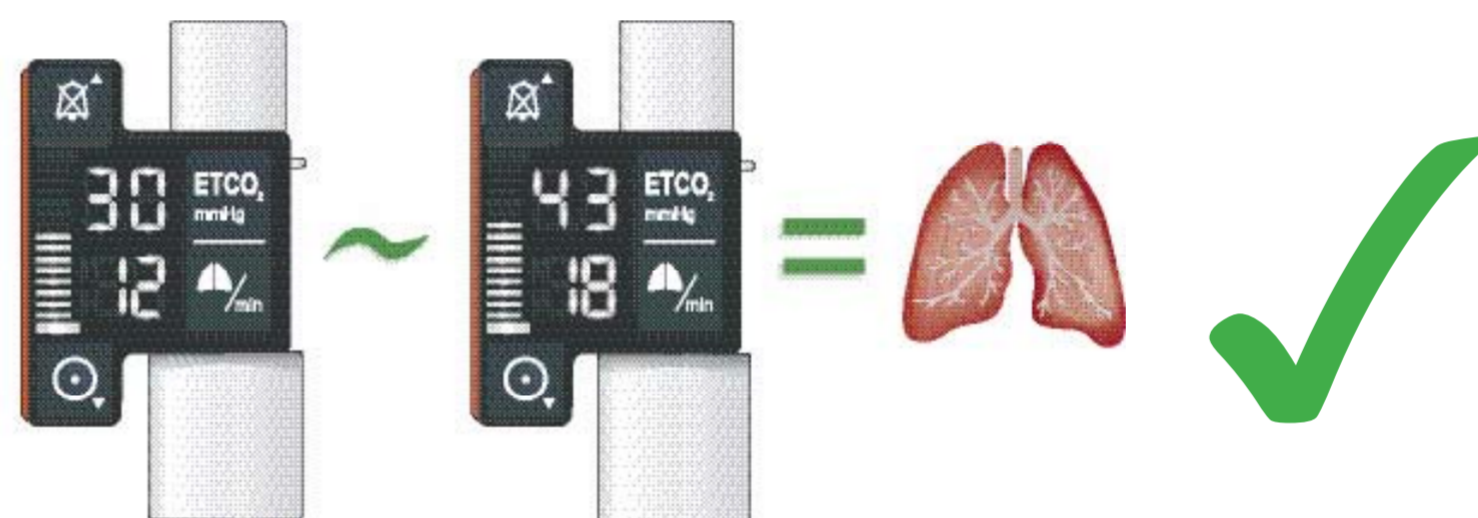

Attention hypoventilation


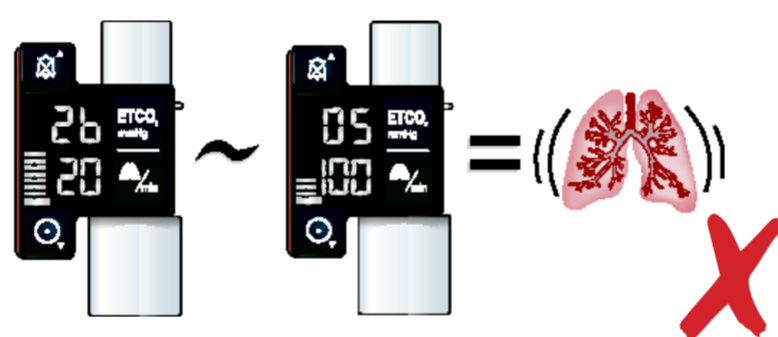


Attention hyperventilation

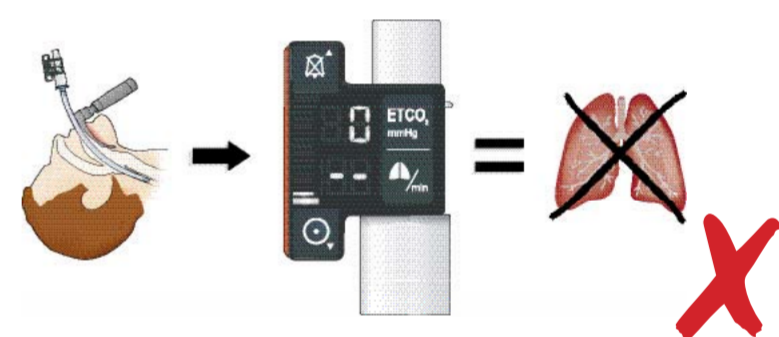



Attention intubation incorrecte

4. Emma pour un contrôle facilité de la RCP

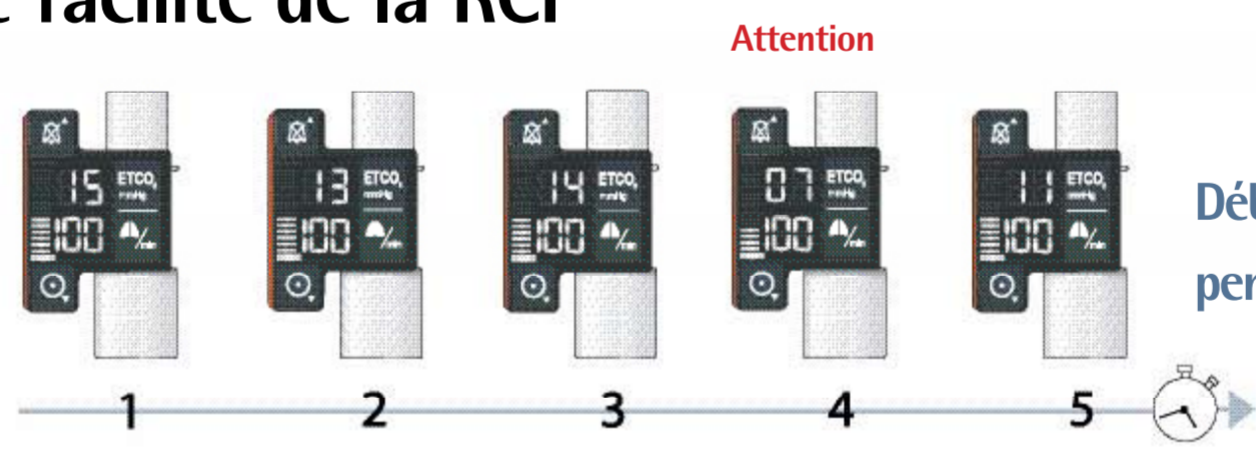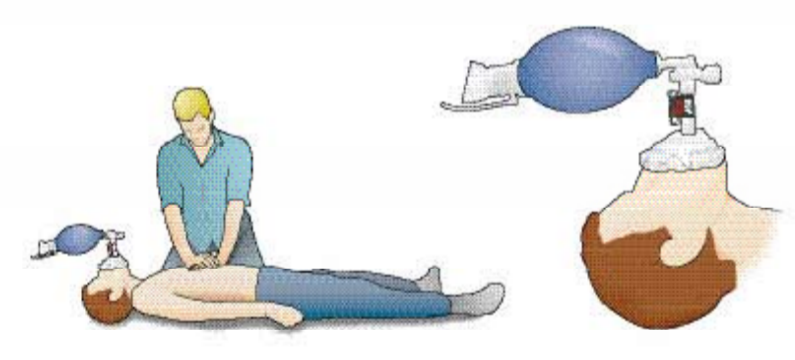

Attention

Débit correct et la fréquence respiratoire pendant la RCP

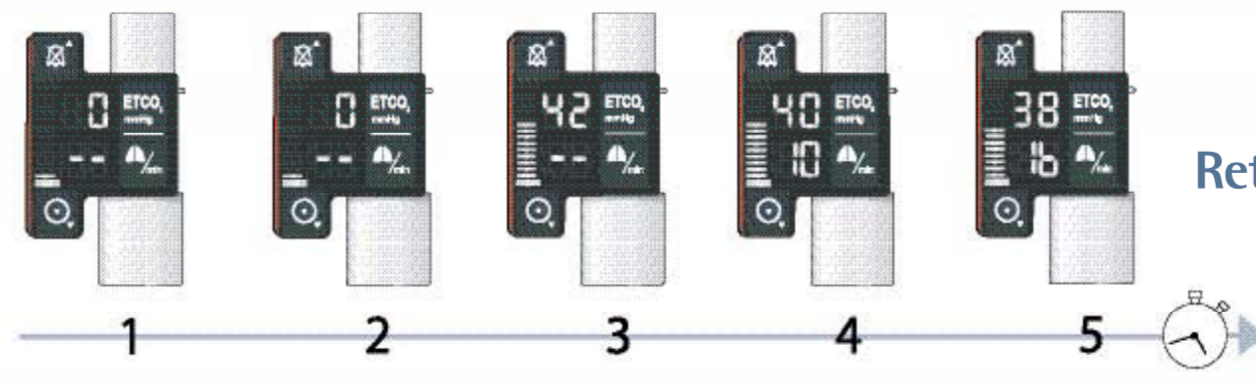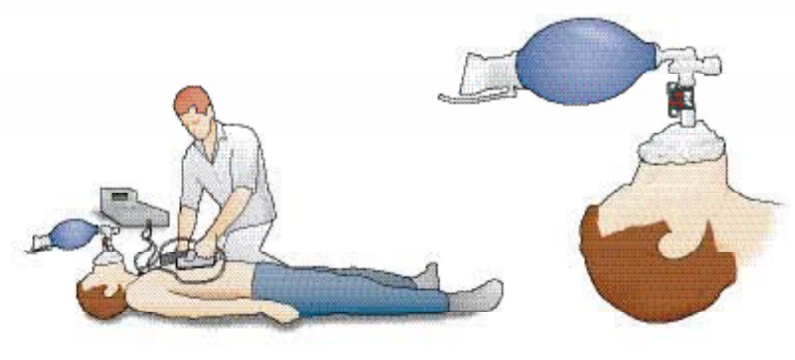

Retour de la circulation spontanée

5. EMMA – Démarrage et mesure



"Une sonde EMMA dans chaque sacoche d'urgence!"



PHASEIN AB, Svärdvägen 15, SE-182 33 Danderyd, Sweden
 phone: +46 8 544 98 150, fax: +46 8 544 98 169
 info@phasein.com - www.phasein.com